

mmol/L

GlucoMen[®] areo GK

- (EN) Quick guide
- (DE) Kurzanleitung
- (SE) Snabbguide
- (NO) Hurtigguide
- (DK) Kvikguide
- (FI) Pikaohje





EN Wash and dry hands thoroughly.

DE Hände gründlich waschen und trocknen.

SE Tvätta och torka händerna nog.

NO Vask og tørk hendene nøye.

DK Vask og tør dine hænder grundigt.

FI Pese ja kuivaa kädet huolellisesti.



EN Insert a test strip fully into the meter.

DE Einen Teststreifen vollständig in das Messgerät einführen.

SE För in en teststicka helt in i mätaren.

NO Før teststrimmelen helt inn i måleren.

DK Sæt teststrimlen helt ind i måleren.

FI Työnnä testiliuska kokonaan mittariin.



EN Prick your finger.

DE Stechen Sie in Ihren Finger.

SE Stick dig i fingret.

NO Stikk i fingeren din.

DK Prik din finger.

FI Pistä sormeen.



- EN** Apply the blood to the end of the test strip.
- DE** Das Blut auf das Ende des Teststreifens auftragen.
- SE** Applicera bloddroppen i änden av teststickan.
- NO** Påfør blodet på enden av teststrimmelen.
- DK** Påfør blodet på enden af teststrimlen.
- FI** Ota vähän verta testiliuskan päähän.

5



GlucoMen[®]
areo GK

- EN** The result is displayed in just 5 seconds.
- DE** Das Ergebnis wird nach nur 5 Sekunden angezeigt.
- SE** Resultatet visas efter bara 5 sekunder.
- NO** Resultatene vil vises etter bare 5 sekunder.
- DK** Resultatet vises på kun 5 sekunder.
- FI** Tulokset näkyvät näytöllä viiden sekunnin kuluessa.

GlucoMen[®] areo GK

(EN) (IR)

A. MENARINI DIAGNOSTICS LTD
405 Wharfodale Road
Wokingham - Berkshire RG41 5RA
Tel. +44-1189-444100
GlucoMen[®] Careline:
(UK) 0800 243667
(Republic of Ireland) 1800 709903
(Northern Ireland) 0800 7837286
Email: myglucomen@menarini diag.co.uk
www.glucomen.co.uk

(DE)

A. MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND
Division der BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
D-12489 Berlin
Tel. 0800-45 82 66 36 (kostenlos)
E-Mail: glucomen@berlin-chemie.de
Internet: www.glucomenareo.de

(SE) (NO) (DK) (FI)

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.
Italien filial (Sverige)
Medson Science Park
Per Albin Hanssons Väg 41
205 12 Malmö - Sverige
Tel. +46-(0)40-321270