

**Glucomen<sup>®</sup>**  
*areo* **GK**

**IT A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.**  
Via Lungo L'Ema, 7  
50012 Bagno a Ripoli - Firenze  
Servizio Clienti: 800 869110  
www.menarinidiagnostics.it

**ES MENARINI DIAGNÓSTICOS S.A.**  
Avenida del Maresme, 120  
08918 Badalona - Barcelona  
Línea directa de atención al cliente:  
Tel. 900 301 334 / 93 507 10 44  
www.menarinidiag.es

**PT MENARINI DIAGNÓSTICOS, LDA**  
Quinta da Fonte, Edifício D. Manuel I, 2º B  
2770-203 Paço de Arcos  
Lisboa - Portugal  
Linha de apoio ao utilizador: 800 200 468  
www.menarinidiag.pt

**BE MENARINI BENELUX NV/SA**  
Division Diagnostics  
De Kleetlaan 3 - 1831 Diegem (Machelen) - Belgium  
Toll Free 0800-99 009

**DE A.MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND**  
Division der BERLIN-CHEMIE AG  
Glienicke Weg 125 - D-12489 Berlin  
Tel. 0800-45 82 66 36 (kostenlos)  
E-Mail: glucomen@berlin-chemie.de  
Internet: www.glucomenareo.de

**AT A.MENARINI GmbH**  
Pottendorfer Straße 25-27/3/1 - A-1120 Wien  
Diabetes-Infoline: +43-(0)1/230 85 10  
www.glucomen.at

**EL MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ**  
Λ. Βουλιαγμένης 575 - 164 51 Αργυρούπολη - ΕΛΛΑΔΑ  
Γραμμή Εξυπηρέτησης Διαβήτη:  
801 11 44400 / 210 99 50 600  
www.menarinidiagnostics.gr

**Glucomen<sup>®</sup>**  
*areo* **GK**

mg/dL

**IT** Guida rapida

**ES** Guía rápida

**PT** Guia rápido

**DE** Kurzanleitung

**FR** Guide rapide

**NL** Snelgids

**EL** Συνοπτικός  
οδηγός χρήσης

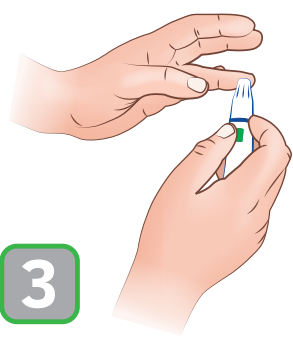


**1**

- IT** Lavare e asciugare le mani con cura.
- ES** Lavar y secar las manos a fondo.
- PT** Lavar e secar cuidadosamente as mãos.
- DE** Hände gründlich waschen und trocknen.
- FR** Lavez-vous et séchez-vous les mains soigneusement.
- NL** Handen grondig wassen en afdrogen.
- EL** Πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας.

**2**

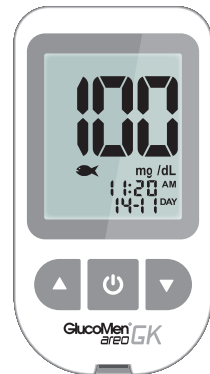
- IT** Inserire un sensore nello strumento, sino in fondo.
- ES** Introducir una tira reactiva en el medidor.
- PT** Inserir completamente uma tira de teste no medidor.
- DE** Einen Teststreifen vollständig in das Messgerät einführen.
- FR** Insérez jusqu'au fond la bandelette (tigette) dans le lecteur.
- NL** Een teststrip volledig in de meter schuiven.
- EL** Εισάγετε μια ταινία μέτρησης πλήρως εντός του μετρητή.

**3**

- IT** Pungere il dito.
- ES** Pinchar el dedo.
- PT** Picar o dedo.
- DE** Stechen Sie in Ihren Finger.
- FR** Piquez votre doigt.
- NL** Een vingerprik uitvoeren.
- EL** Τρυπήστε το δάκτυλό σας.

**4**

- IT** Applicare il sangue all'estremità del sensore.
- ES** Colocar la gota de sangre en el borde de la tira.
- PT** Colocar o sangue na extremidade da tira de teste.
- DE** Das Blut auf das Ende des Teststreifens auftragen.
- FR** Appliquer le sang à l'extrémité de la bandelette (tigette).
- NL** De bloeddruppel op het uiteinde van de teststrip aanbrengen.
- EL** Αγγίξτε τη σταγόνα αίματος με την άκρη της ταινίας μέτρησης.

**5****GlucoMen<sup>®</sup> areo GK**

- IT** Il risultato viene visualizzato in solo 5 secondi.
- ES** El resultado se visualizará en sólo 5 segundos.
- PT** O resultado é exibido em apenas 5 segundos.
- DE** Das Ergebnis wird nach nur 5 Sekunden angezeigt.
- FR** Le résultat sera affiché en 5 secondes.
- NL** Het resultaat wordt binnen slechts 5 seconden weergegeven.
- EL** Το αποτέλεσμα απεικονίζεται σε μόλις 5 δευτερόλεπτα.

**A.MENARINI**  
diagnostics