



# Glucolog

Lite



**Cloud Software and Apps**  
for diabetes management



## Wat is mogelijk?

- ✓ *Monitor uw bloedglucose waarden*
- ✓ *Monitor uw ketonen waarden*
- ✓ *Monitor uw insuline toediening*
- ✓ *Snel downloaden van uw data*
- ✓ *Snel en eenvoudig in te stellen*
- ✓ *Voeg markeringen en notities toe*
- ✓ *Bekijk uw statistieken*
- ✓ *Verzend uw data direct via de cloud*
- ✓ *Gratis te downloaden en gebruiken*



## Welke bloedglucosemeters zijn geschikt?

In BELGIË:

Glucomen<sup>®</sup>  
*areo* GK





Glucomen<sup>®</sup>  
*areo*



Glucomen<sup>®</sup>  
*areo* 2K



# 1. Installatie

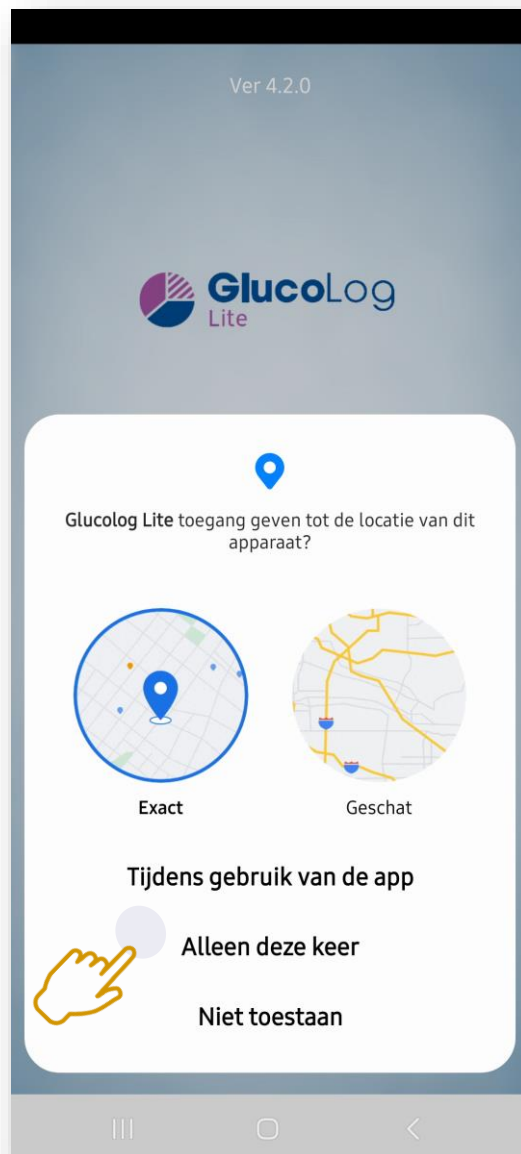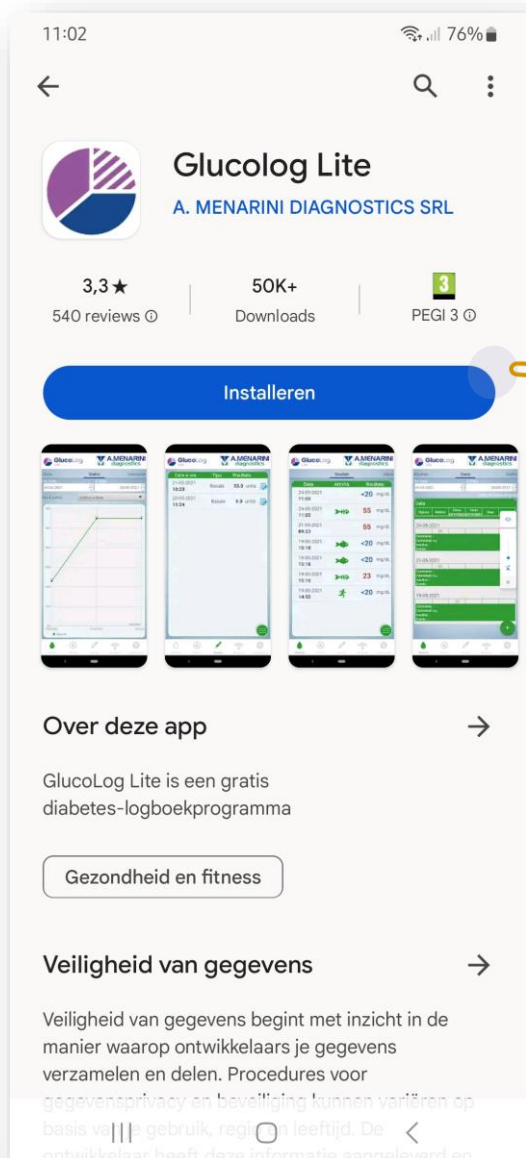

Zoek in de **Google Playstore** of **Apple Appstore** naar de App **Glucolog Lite**. Download en installeer deze vervolgens.

Bij het openen van de App zal eerst gevraagd worden naar toestemming voor toegang tot de locatie van uw smartphone. Dit is nodig voor een optimale werking van de App.



# 1. Installatie



**Glucolog Lite** **A.MENARINI diagnostics**

### Instellingen

**Gebruiker**

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht  M  F

E-mail

PID

**Metingen**


Toon gewiste resultaten

Ketonen  Ja

Insulinecontrole  Ja

Meter

Glucose Ketonen Insulin Ontvangst Instellingen

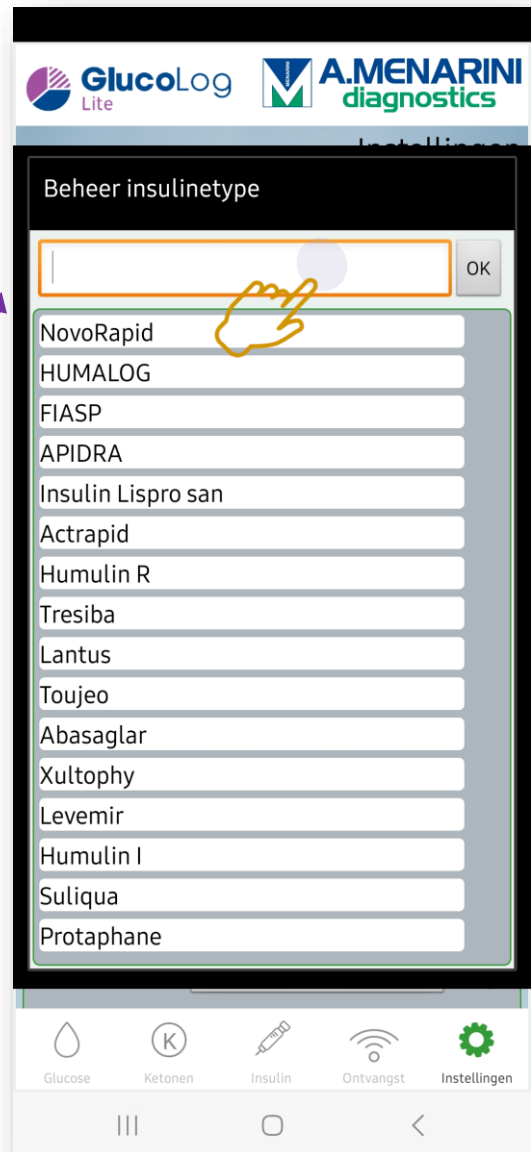

**Glucolog Lite** **A.MENARINI diagnostics**

### Beheer insulinetype

NovoRapid

HUMALOG

FIASP

APIDRA

Insulin Lispro san

Actrapid

Humulin R

Tresiba

Lantus

Toujeo

Abasaglar

Xultophy

Levemir

Humulin I

Suliqua

Protaphane

Glucose Ketonen Insulin Ontvangst Instellingen

Allereerst dient u enkele instellingen in te vullen.

- **PID** (persoonlijke identificatie) kunt u overslaan (leeg laten)!
- Geef aan of u wel of niet **ketonenwaarden** wilt opslaan
- U kunt eventueel een koppeling maken met **Samsung Health** of **Apple Health**
- Bij "**Beheer insulinetype**" kunt u indien nodig een ander type insuline toevoegen.

# 1. Installatie




Selecteer vervolgens de **juiste meter** die u heeft. En noteer het volledige **serienummer** (inclusief de eerste twee letters).

Bij "Accessoires" vindt u de mogelijkheid om een PENCAP te selecteren, maar dit is niet beschikbaar in de Benelux. U kunt deze leeg laten. De meeteenheden dient u aan te geven (voor België/Luxemburg is dit **mg/dL**). U kunt ook uw persoonlijke **glucosedrempels** (hoog en laag) invullen. Web server kunt u leeglaten. Verbinding maken met **GlucoLog Web** is echter wél mogelijk!





# 1. Installatie

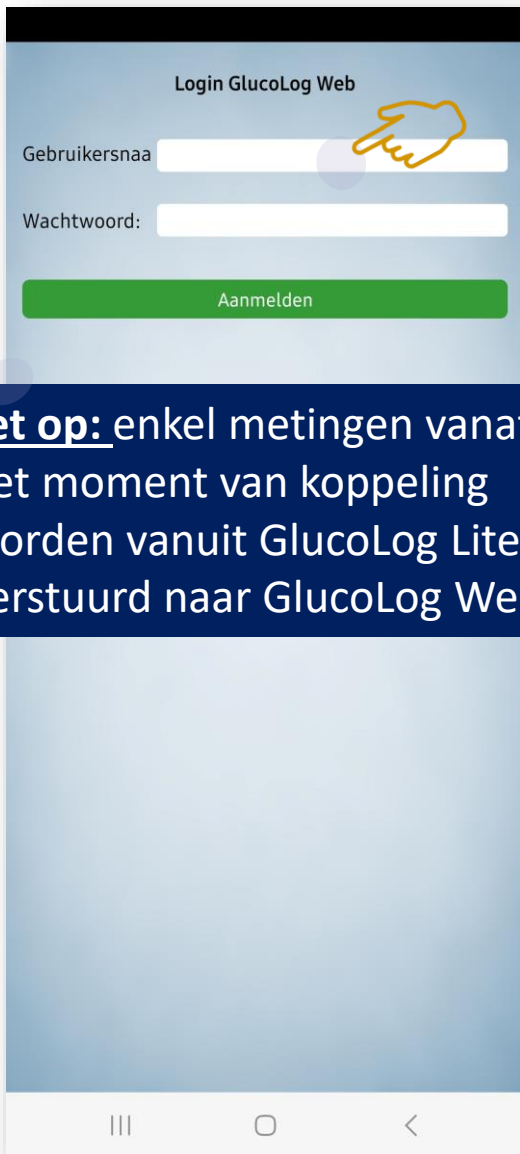

**Let op:** enkel metingen vanaf het moment van koppeling worden vanuit Glucolog Lite verstuurd naar Glucolog Web!



Indien u reeds een account heeft aangemaakt bij **Glucolog Web** ([www.glucologweb.com](http://www.glucologweb.com)) kunt u hier uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen voor een automatische koppeling tussen de App en de online omgeving van Glucolog Web.

Vervolgens kunt u nog uw **persoonlijke dagindeling** aanmaken. U kunt naar wens de tijden selecteren en ieder dagdeel een naam geven. Tot **maximaal 10 perioden!**

# 1. Installatie



Verder dient u nog toestemming te geven voor het gebruik van de NFC-verbinding met uw smartphone. Dit maakt het mogelijk om uw meter contactloos uit te lezen naar de App.

**Let op:** bij sommige smartphones (o.a. iPhone van Apple) is het nodig om expliciet toestemming te geven om “data” te versturen via NFC! Controleer dit bij de algemene instellingen van uw smartphone!






## 2. Meter uitlezen


### 1.

Schakel de NFC-functie van uw mobiele apparaat in en installeer de Glucolog Lite-App (gratis beschikbaar in de Google Play en App Store).

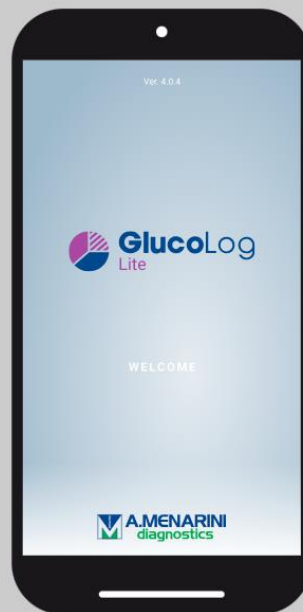

### 2.

De NFC functie op uw Glucomen Areo GK meter staat standaard uit (OFF), maar kan worden geactiveerd als volgt: Druk op de ▲ of ▼ knop om het aan of uit (ON of OFF) te zetten. Druk op de I/O knop om het te bevestigen en af te sluiten.

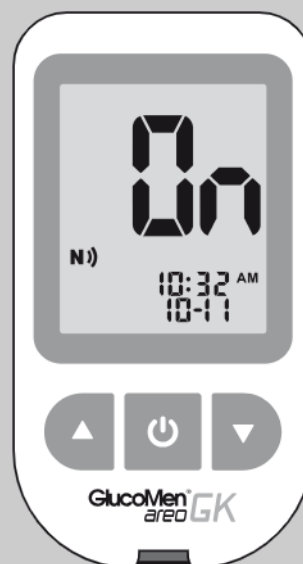


## 2. Meter uitlezen



### 3.

Open de GlucoLog Lite 'Ontvangst' pagina en breng de GlucoMen Areo GK NFC antenne dicht (< 1 cm) bij de antenne van het met NFC beschikbare apparaat.

Data transmissie zal automatisch starten (de GlucoMen Areo GK meter zal aangaan en het knipperende icoon zal worden getoond op het display). Na het downloaden van de data, zal de meter automatisch uitschakelen.

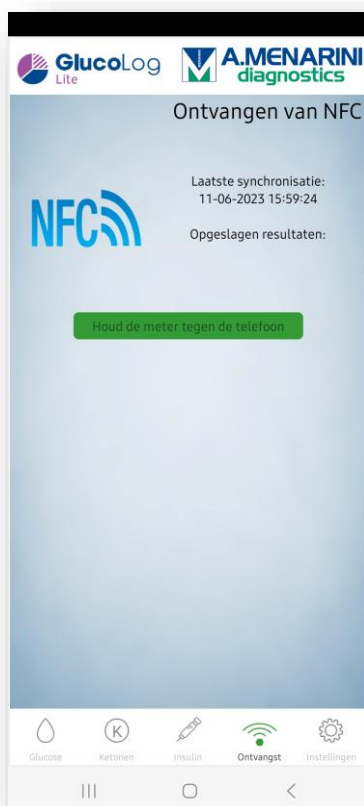

# 3. Analyseren

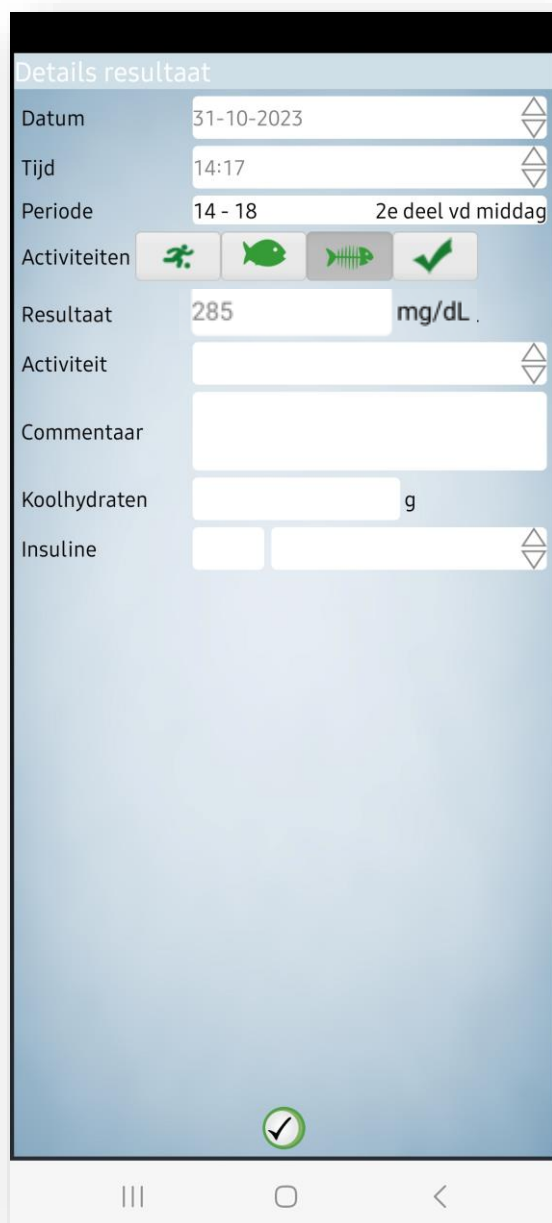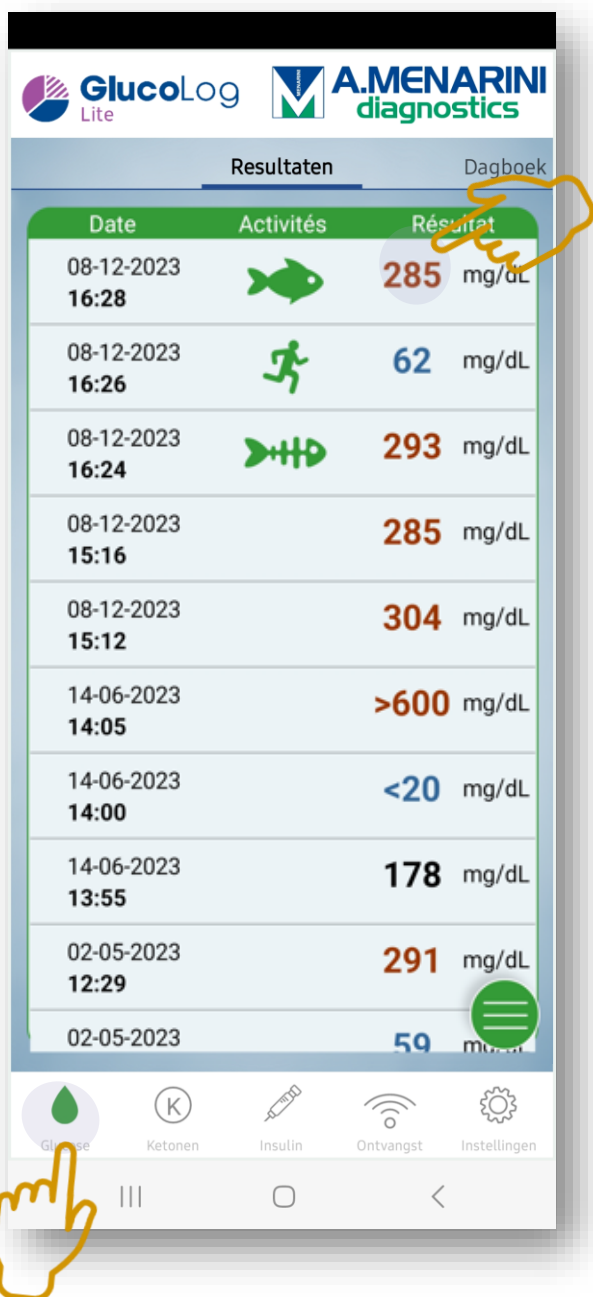

In het **hoofdmenu** voor “**Glucose**” vindt u alle bloedglucose metingen, op volgorde gesorteerd (de meest recente staat bovenaan). U kunt nog **commentaar toevoegen** aan iedere meting door hierop te tikken, waaronder **koolhydraat** inname, toegediende hoeveelheid **insuline** en een **open tekstvak** voor overige toelichting.

# 3. Analyseren



Date	Activités	Résultat
08-12-2023 16:28		285 mg/dL
08-12-2023 16:26		62 mg/dL
08-12-2023 16:24		293 mg/dL
08-12-2023 15:16		285 mg/dL
08-12-2023 15:12		304 mg/dL
14-06-2023 14:05		>600 mg/dL
14-06-2023 14:00		<20 mg/dL
14-06-2023 13:55		178 mg/dL
02-05-2023 12:29		291 mg/dL
02-05-2023		59 mg/dL



Date	Activités	Résultat
08-12-2023 16:28		285 mg/dL
08-12-2023 16:26		62 mg/dL
08-12-2023 16:24		293 mg/dL
08-12-2023 15:16		285 mg/dL
08-12-2023 15:12		304 mg/dL
14-06-2023 14:05		>600 mg/dL
14-06-2023 14:00		<20 mg/dL
14-06-2023 13:55		178 mg/dL
02-05-2023 12:29		291 mg/dL
02-05-2023		59 mg/dL

In het **hoofdmenu** voor “**Glucose**” ziet u rechtsonder een icoon met 3 horizontale strepen. U kunt hier een **backup** maken en deze lokaal opslaan. U kunt ook **handmatig een glucosemeting toevoegen** door op de + te drukken. Tot slot kunt u ook opdracht geven om voor een geselecteerde periode de waarden door te sturen naar een **online (web) omgeving**.





# 3. Analyseren



In het **hoofdmenu** voor “**Glucose**” kunt u het scherm naar links **swipen** om in het **dagboek** menu te komen. Hiervandaan kunt u de metingen uit de **geselecteerde periode** doorsturen per **e-mail** of **SMS**. Wanneer u nogmaals swipet komt u in het scherm met de **diverse grafieken**.





# 3. Analyseren

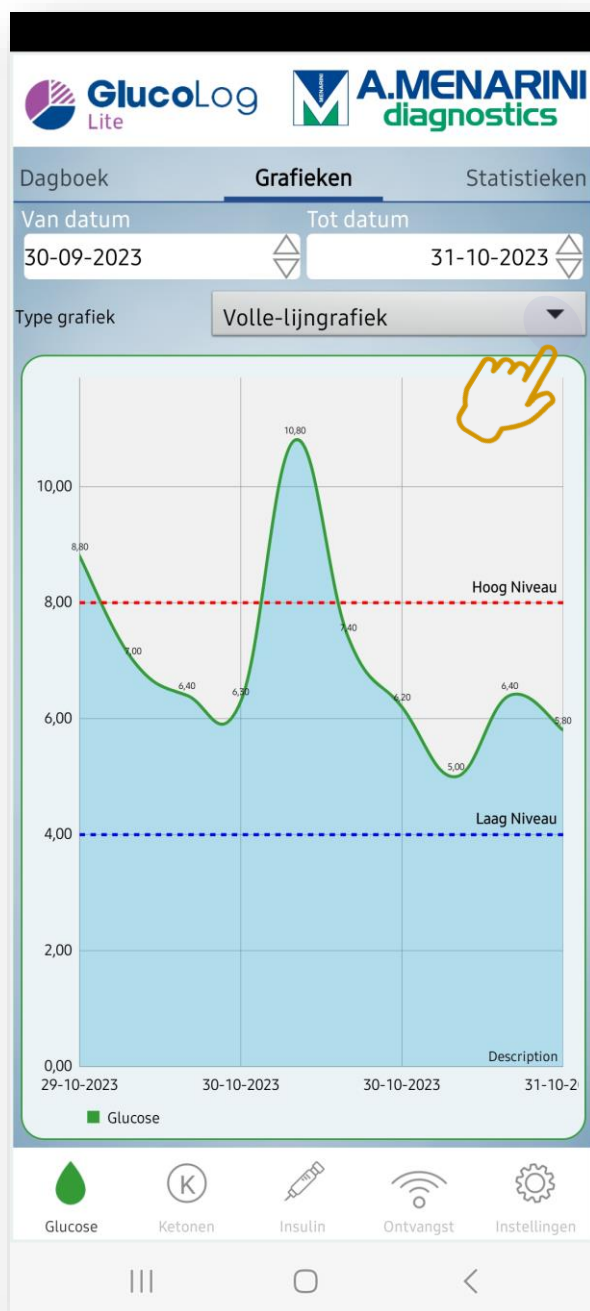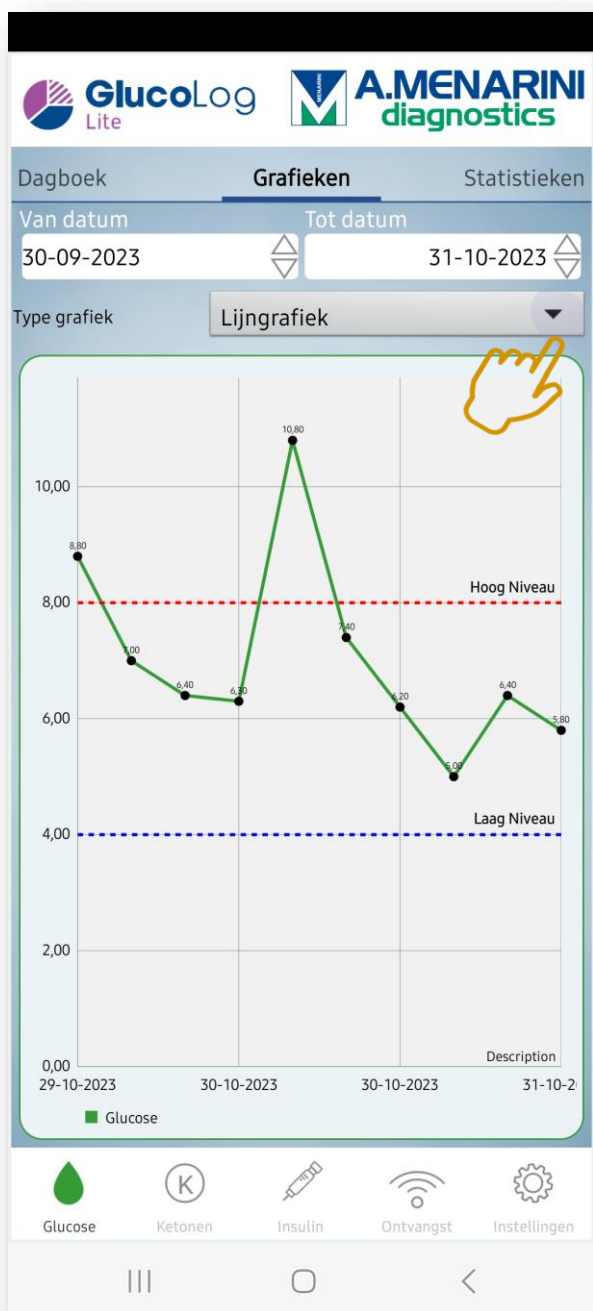

In het **grafieken** scherm kunt u kiezen uit diverse manieren om de metingen te bekijken. Bij de **lijngrafiek** ziet u de metingen verbonden met een lijn. U kunt ook op de meetpunten tikken om eventueel **commentaar** bij de meting te bekijken. In de “**volle-lijngrafiek**” is het deel onder de lijn gekleurd ter verduidelijking.



# 3. Analyseren

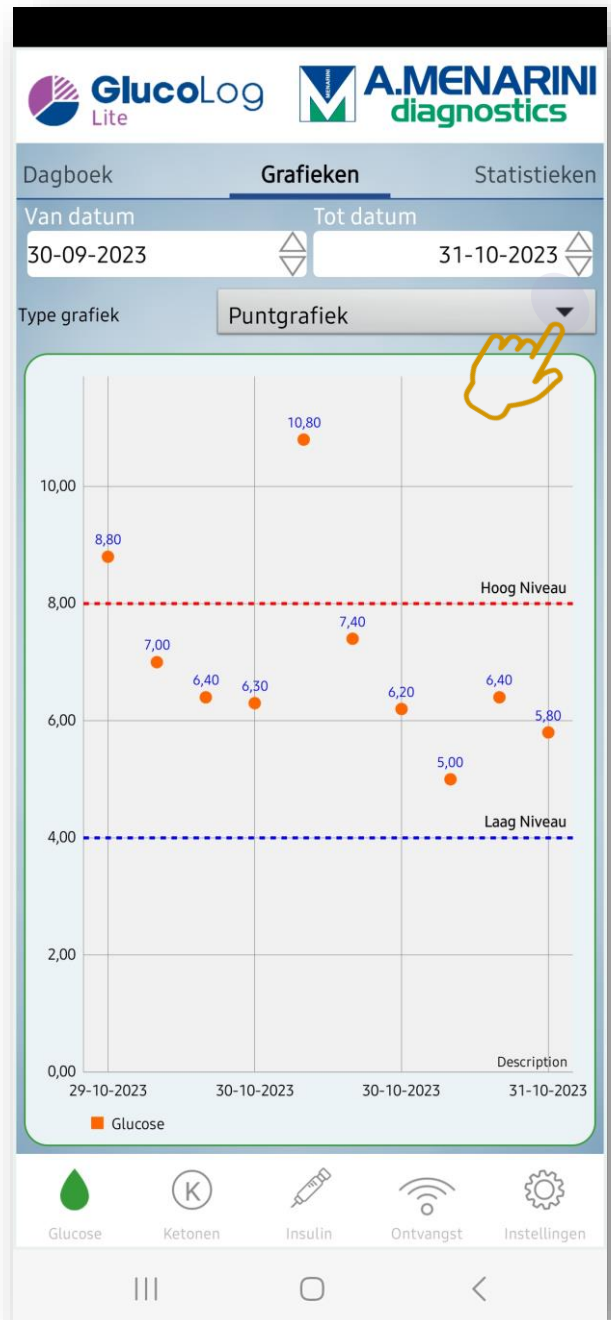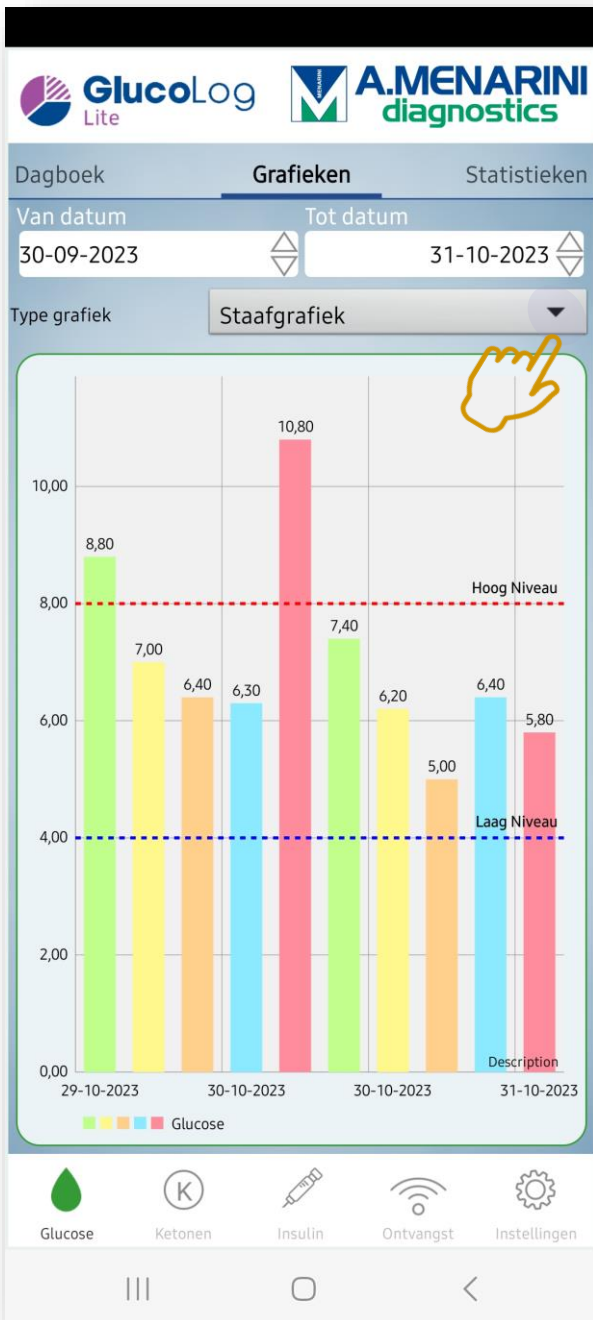

In de “**staafgrafiek**” wordt iedere meting weergegeven door een ingekleurde balk. Bij de **puntgrafiek** zijn de metingen niet verbonden met een lijn, maar wordt enkel een punt in het diagram weergegeven.




# 3. Analyseren



Wanneer u het scherm nogmaals naar links swipet/veegt, ziet u het scherm met de **statistieken** voor de **geselecteerde periode**. U ziet het **aantal metingen per dagdeel**, maar ook de **gemiddelden** en de **standaardafwijking** (wat een maatstaf is voor de variatie van de diverse metingen t.o.v. het gemiddelde).

# 4. Data delen

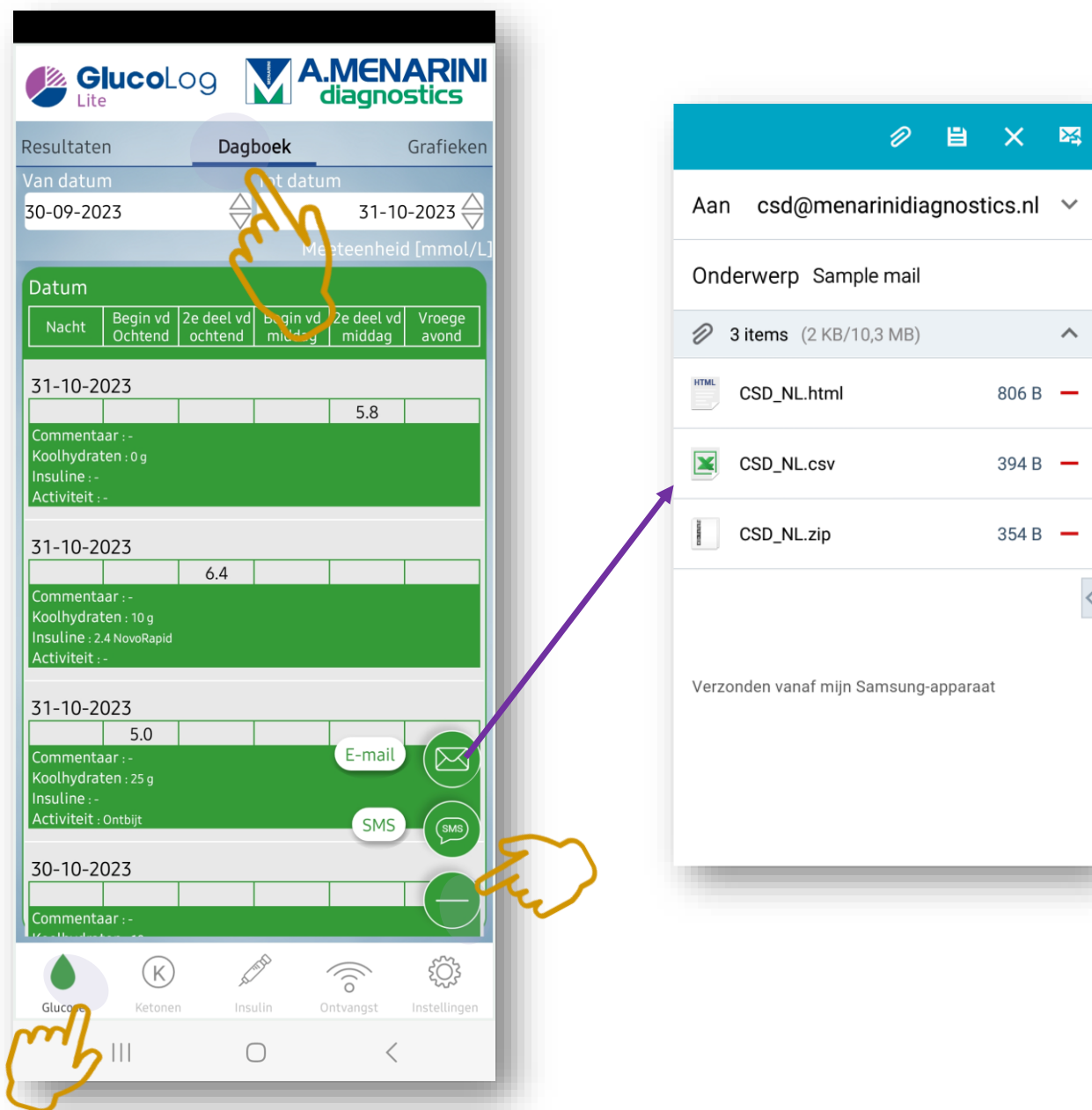

In het **hoofdmenu** voor “**Glucose**” kunt u het scherm naar links **swipen** om in het **dagboek** menu te komen. Hiervandaan kunt u de metingen uit de **geselecteerde periode** doorsturen per **e-mail** of **SMS**. Een e-mail wordt gereed gemaakt met 3 bijlagen, waaronder een **CSV-bestand** wat te openen is met *Excel*.



# Glucolog

## Lite



Date/Time	Activity	Result
22-04-2021 09:00		210 mg/dL
22-04-2021 22:00		145 mg/dL
22-04-2021 22:00		156 mg/dL
22-04-2021 11:40		BACKUP
22-04-2021 11:40		6.6 ADD
22-04-2021 09:30		123 mg/dL
22-04-2021 09:30		110 VIA WIEB
22-04-2021 09:30		89 mg/dL

Meer info?

**België:**

[www.glucomenday.be](http://www.glucomenday.be)