

GLUCOFIX[®]
TECH GK

NL

MENARINI BENELUX N.V./S.A.
Division Diagnostics
De Kleetlaan 3
1831 Diegem (Machelen) - Belgium
Tel. +31 (0)40 208 20 00
Fax +31 (0)40 204 21 84
Toll Free 0800-022 5422

EN IR A. MENARINI DIAGNOSTICS LTD
405 Wharfedale Road
Wokingham - Berkshire RG41 5RA
Tel. +44-1189-444100
GlucoMen[®] Careline:
(UK) 0800 243667
(Republic of Ireland) 1800 709903
(Northern Ireland) 0800 7837286
Email: myglucomen@menarinidiag.co.uk
www.glucomen.co.uk

A.MENARINI
diagnostics

52174 - 09/22



GLUCOFIX[®]
TECH GK

NL

Snelgids

EN

Quick Guide



mmol/L



A.MENARINI
diagnostics



1

- NL Handen grondig wassen en afdrogen.
- EN Wash and dry hands thoroughly.



2

- NL Een teststrip volledig in de meter schuiven.
- EN Insert a test strip fully into the meter.



3

- NL Een vingerprik uitvoeren.
- EN Prick your finger.



4

- NL De bloeddruppel op het uiteinde van de teststrip aanbrengen.
- EN Apply the blood to the end of the test strip.



5



- NL Het resultaat wordt binnen slechts 5 seconden weergegeven.
- EN The result is displayed in just 5 seconds.

GLUCOFIX[®]
TECH GK